

Návod k použití

ADIEL SeeNow těhotenský test hCG



Popis a parametry

ADIEL SeeNow těhotenský test jednorázový test, je vysoce citlivý pro včasné zjištění těhotenství. Zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství. Test je určen pro sebetestování, jednou z hlavních výhod stripového (prouzkového) těhotenského testu je jeho snadné použití. Určeno výhradně pro vnější použití.

- Vysoká citlivost = 10mlU/ml – test můžete použít ode dne očekávané menstruace
- Měří s 99% přesností
- Rychlost – pozitivní výsledek během první minuty
- Použitelnost – okamžitě, kdykoli během dne

Co ještě potřebujete?

1. Čistou a suchou nádobku ze skla nebo plastu, do které odeberete moč.
2. Časomíru (hodiny nebo hodinky).

Kdy mohu odebrat moč pro testování?

Tento test je obzvláště vhodný i pro zjištění raného těhotenství. Pro zjištění těhotenství lze použít jakýkoliv vzorek Vaší moči, nejvhodnější však je první ranní moč, protože obsahuje nejvyšší koncentraci hCG.

Jak odebrat moč?

Vzorky moči můžete odebrat do jakékoliv čisté a suché nádoby z plastu nebo skla.

Provedení testu

1. Testování provádějte při běžné pokojové teplotě (15–30 °C).
2. Otevřete sáček a vyndejte z něj testovací proužek.
3. Ponořte proužek do vzorku moči tak, aby šipka směřovala do vzorku. Po 10 sekundách proužek vyjměte a položte jej na vodorovný, čistý, suchý a nenásávkový povrch (například na vrchní část nádoby s močí). **DŮLEŽITÉ:** Proužek neponořujte do moči nad vyznačenou maximální línii (MAX), jinak test neproběhne správným způsobem!
4. Pozitivní výsledek můžete pozorovat již během 1 minuty, avšak pro potvrzení negativního výsledku je třeba vyčkat 3 minuty, dokud reakce neproběhne úplně. Výsledky nečtěte více jak po 10 minutách (již neplatný výsledek).

Čtení výsledků

Negativní výsledek (nejste těhotná):

Objevil se pouze jeden barevný proužek, a to v kontrolní oblasti (C). Není patrný žádný barevný proužek v testovací (T) oblasti. To znamená, že těhotenství nebylo testem potvrzeno.

Pozitivní výsledek (jste těhotná):

V kontrolní (C) i testovací (T) oblasti se objevily dva zřetelné barevné proužky. Znamená to, že jste těhotná. Intenzita zbarvení proužku v testovací oblasti závisí na koncentraci hCG, která se během těhotenství mění.

Neplatný výsledek:

Pokud nebyl test proveden správným způsobem, neobjevil se žádný barevný proužek nebo se objevil pouze proužek v testovací oblasti (T), nikoliv však v kontrolní oblasti (C). Zopakujte test znovu. Pokud je výsledek testu opakovaně neplatný, kontaktujte prosím výrobce nebo prodejce. Nezapomenejte uvést číslo šarže, které naleznete na obalu testu (LOT).

Poznámka: Pokud je zbarvení proužku v testovací oblasti slabé, doporučujeme provést test po 48 hodinách znovu. Testovací proužek je jednorázový, nemůže být použit opakovaně.

Upozornění: Uchovávejte v originálním uzavřeném sáčku při teplotě 4–30 °C nejdéle do data použitelnosti.

Chraňte před vlhkostí, nevystavujte zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nesmí zmrznout!


Sáček otvírejte teprve těsně před použitím testu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah balení: Testovací strips (proužky) v ochranném obalu + vysoušecí polštářek. Vysoušecí polštářek slouží pouze pro účely skladování, pro vlastní testování se nepoužívá. Příbalový leták s návodem k použití.

Diagnostický zdravotnický prostředek je určen pro sebetestování in vitro ve shodě s nařízením č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Výrobce: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd, Building 15, Building 12 (west), Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology Development Zone, 226010, Nantong, P. R. China

Distribuce: ADIEL s.r.o. V Cibulkách 359/52, Praha 5 – 15000, Česká republika
Více informací na: www.otehotnet.cz

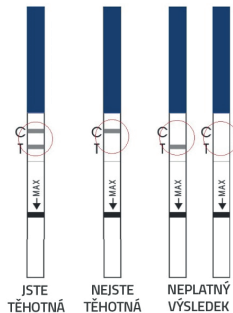

Návod na použitie

ADIEL SeeNow tehotenský test hCG



Popis a parametre

ADIEL SeeNow tehotenský test jedorázový test, je vysoko citlivý pre včasné zistenie tehotenstva. Zisťuje prítomnosť ľudského choriového gonadotropínu (hCG), ktorý sa objavuje v moči už vo veľmi ranom období tehotenstva. Test je určený na sebatestovanie. Jednou z hlavných výhod stripsového (prúžkového) tehotenského testu je jeho ľahké použitie. Určené výhradne na vonkajšie použitie.

- Vysoká citlivosť = 10mIU/ml – test môžete použiť od dňa očakávanej menštruácie
- Meria s 99% presnosťou
- Rýchlosť – pozitívny výsledok počas 1 minúty
- Použitelnosť – okamžite, kedykoľvek počas dňa

Čo ešte potrebujete?

1. Čistú a suchú nádobku zo skla alebo plastu, do ktorej odoberte moč
2. Časomieru (hodiny alebo hodinky)

Kedy môžem odobrať moč na testovanie?

Tento test je obzvlášť vhodný aj na zistenie raného tehotenstva. Na zistenie tehotenstva je možné použiť akúkoľvek vzorku vašeho moču, najvhodnejší však je prvý ranný moč, lebo obsahuje najvyššiu koncentráciu hCG.

Ako odobrať moč?

Vzorky moču môžete odobrať do akejkoľvek čistej a suchej nádoby z plastu alebo skla.

Vykvanie testu

1. Testovanie robte pri bežnej izbovej teplote (15–30 °C)
2. Otvorte vrecko a vyberte z neho testovací prúžok.
3. Ponorte prúžok do vzorky moču tak, aby špička smerovala do vzorky. Po 10 sekundách prúžok vyberte a položte na vodorovný, čistý, suchý a nenasiakavý povrch (napríklad na vrchnú časť nádoby s močou). **DÔLEŽITÉ:** Prúžok neponárajte do moču nad vyznačenou maximálnou líniou (MAX), inak test neprebehne správnym spôsobom!
4. Pozitívny výsledok môžete pozorovať už počas 1 minúty, avšak pre potvrdenie negatívneho výsledku je treba počkať 3 minúty, dokiaľ reakcia neprebehne úplne. výsledky nečítajte viac ako po 10 minútach (už neplatný výsledok).

Čítanie výsledkov

Negatívny výsledok (nie ste tehotná):

Objavil sa len jeden farebný prúžok, a to v kontrolnej oblasti (C). Nie je patrný žiadny farebný prúžok v testovacej (T) oblasti. To znamená, že tehotenstvo nebolo testom potvrdené. Nečítajte výsledky po viac ako 10 minútach.

Pozitívny výsledok (ste tehotná):

V kontrolnej (C) aj testovacej (T) oblasti sa objavili dva zreteľne farebné prúžky. Znamená to, že ste tehotná. Intenzita zafarbenia prúžku v testovacej oblasti závisí na koncentrácii hCG, ktorá sa počas tehotenstva mení. Nečítajte výsledky po viac ako 10 minútach.

Neplatný výsledok:

Pokiaľ nebol test urobtený správnym spôsobom, neobjavil sa žiadny farebný prúžok alebo sa objavil len prúžok v testovacej oblasti (T), nie však v kontrolnej oblasti (C). Zopakujte test znova. Pokiaľ je výsledok testu opakovane neplatný, kontaktujte, prosím, výrobu alebo predajcu. Nezapodnite uviesť číslo sárže, ktoré nájdete na obale testu (LOT).

Poznámka: Pokiaľ je zafarbenie prúžku v testovacej oblasti slabé, odporúčame urobiť test po 48 hodinách znova. Testovací prúžok je jednorázový, nemôže byť použitý opakovane.

Upozornenie: Uchovávajte v originálnom zatvorenom vrecku pri teplote 4–30 °C, najdlhšie do dátumu použiteľnosti.

Chráňte pred vlhkosťou, nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Nesmie zmrznúť!

Vrecko otvárajte až tesne pred použitím testu. Uchovávajte mimo dosah detí.

Obsah balenia: Testovacie strips (prúžky) v ochrannom obale + vysušiaci vankúšik. Vysušiaci vankúšik slúži len na účely skladovania, pre vlastné testovanie sa nepoužíva. Príbalový leták s návodom na použitie.

Diagnostický zdravotnícky prostriedok je určený na sebatestovanie in vitro v shode s nariadením č. 56/2015 Sb, o technických požiadavkách na diagnostické zdravotnícke prostriedky in vitro.

Výrobca: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd, Building 15, (west), Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology Development Zone, 226010, Nantong, P. R. China

Distribúcia: ADIEL s.r.o. V Cibulkách 359/52, Praha 5 – 15000, Česká republika
Viac informácií na: www.adiel.sk

