

Návod k použití

ADIEL SeeNow ovulační testy LH



Popis a parametry

ADIEL SeeNow ovulační testy LH ověří vaše plodné dny s 99% přesností. Rychlým testem z moči zjistíte, kdy je ideální příležitost pro otěhotnění, luteinizační hormon způsobuje, že se vajíčko uvolňuje do vejcovodu a v tomto okamžiku začíná doba, která je pro početí nejvhodnější – vaše plodné dny. Test je určen pro sebetestování. Jednou z hlavních výhod stripsového (proužkového) ovulačního testu je jeho snadné použití. Určeno výhradně pro vnější použití.

- Měří s 99% přesností
- Rychlost – výsledek během první minuty
- Použitelnost – okamžitě, kdykoli během dne

Co ještě potřebujete?

1. Čistou a suchou nádobku ze skla nebo plastu, do které odeberete moč.
2. Časomíru (hodiny nebo hodinky).

Kdy mohu odebrat moč pro testování?

Nedoporučujeme testovat z první ranní moči. Provádějte test ideálně každý den ve stejnou dobu.

Jak odebrat moč?

Vzorky moči můžete odebrat do jakékoliv čisté a suché nádobky z plastu nebo skla.

Provedení testu

1. Provádějte test ideálně každý den ve stejnou dobu.
2. Testování provádějte při běžné pokojové teplotě (15–30 °C).
3. Otevřete sáček a vyndejte z něj testovací proužek.
4. Ponořte proužek do vzorku moči tak, aby šipka směřovala do vzorku. Po 15 sekundách proužek vyjměte a položte jej na vodorovný, čistý, suchý a nenásávkavý povrch (například na vrchní část nádobky s močí). **DŮLEŽITÉ:** Proužek neponořte do moči nad vyznačenou maximální linii (MAX), jinak test neproběhne správným způsobem!
5. Pozitivní výsledek můžete pozorovat již během 1 minuty, avšak pro potvrzení negativního výsledku je třeba vyčkat 5 minut, dokud reakce neproběhne úplně. Nečtěte výsledky po více než 10 minutách.

Čtení výsledků

Negativní výsledek (Nemáte ovulaci):

ovulace zatím neprobíhá: Testovací čárka (T) je světlejší než kontrolní čárka (C), nebo se neobjeví vůbec.

Pozitivní výsledek (Máte ovulaci):

Vaše ovulace buď probíhá nebo nastane v příštích 24–48 hodinách: Testovací čárka (T) je stejně nebo tmavší barvy než kontrolní čárka (C).

Neplatný výsledek:


Pokud nebyl test proveden správným způsobem, neobjeví se žádný barevný proužek nebo se objeví pouze proužek v testovací oblasti (T), nikoliv však v kontrolní oblasti (C). Zopakujte test znovu. Pokud je výsledek testu opakovaně neplatný, kontaktujte prosím výrobce nebo prodejce. Nezapomenejte uvést číslo šarže, které naleznete na obalu testu (LOT).

Poznámka: Pokud je zbarvení proužku v testovací oblasti slabé, doporučujeme provést test po 24–48 hodinách znovu. Testovací proužek je jednorázový, nemůže být použit opakovaně.

Upozornění: Uchovávejte v originálním uzavřeném sáčku při teplotě 4–30 °C nejdéle do data použitelnosti.

Chraňte před vlhkostí, nevystavujte zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření. Nesmí zmraznout!

Sáček otvírejte teprve těsně před použitím testu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

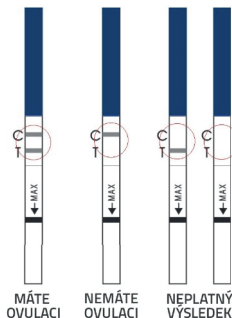

Obsah balení: Testovací strips (proužky) v ochranném obalu + vysoušecí polštářek. Vysoušecí polštářek slouží pouze pro účely skladování, pro vlastní testování se nepoužívá. Příbalový leták s návodem k použití.

Diagnostický zdravotnický prostředek je určen pro sebetestování in vitro ve shodě s nařízením č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Výrobce: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd, Building 15, Building 12 (west), Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology Development Zone, 226010, Nantong, P. R. China

Distribuce: ADIEL s.r.o. V Cibulkách 359/52, Praha 5 – 15000, Česká republika
Více informací na: www.otehotnet.cz

Návod na použitie

ADIEL SeeNow ovulačný testy LH



Popis a parametry

ADIEL SeeNow ovulačný test LH overí vaše plodné dni s 99% presnosťou. Rýchlym testom z moču zistíte, kedy je ideálna príležitosť na otehotnenie. Luteinizačný hormón spôsobuje, že sa vajíčko uvoľňuje do vajíčovodu a v tomto okamihu začína čas, ktorý je pre počatie najprihodnejší – vaše plodné dni. Test je určený na sebatestovanie. Jednou z hlavných výhod stripového (prúžkového) ovulačného testu je jeho ľahké použitie. Určené výhradne na vonkajšie použitie.

- Meria s 99% presnosťou
- Rýchlosť – výsledok počas prvej minúty
- Použitelnosť – okamžite, kedykoľvek počas dňa

Čo ešte potrebujete?

1. Čistú a suchú nádobku zo skla alebo plastu, do ktorej odoberiete moč
2. Časomieru (hodiny alebo hodinky)

Kedy môžem odoberať moč na testovanie?

Neodporúčame testovať z prvého ranného moču. Robte test ideálne každý deň v rovnaký čas.

Ako odobrať moč?

Vzorky moču môžete odoberať do akejkoľvek čistej a suchej nádoby z plastu alebo skla.

Vykvanie testu

1. Robte test ideálne každý deň v rovnaký čas
2. Testovanie robte pri bežnej izbovej teplote (15–30 °C)
3. Otvorte vrecko a vyberte z neho testovací prúžok
4. Ponorte prúžok do vzorky moču tak, aby špička smerovala do vzorky. Po 15 sekundách prúžok vyberte a položte ho na vodorovný, čistý, suchý a nenasiakavý povrch (napríklad na vrchnú časť nádoby s močom). **DÔLEŽITÉ:** Prúžok neponárajte do moču nad vyznačenou maximálnou líniou (MAX), inak test neprebehne správnym spôsobom!
5. Pozitívny výsledok môžete pozorovať už počas 1 minúty, avšak na potvrdenie negatívneho výsledku je treba počkať 5 minút, dokiaľ reakcia neprebekne úplne. Nečítajte výsledok po viac ako 10 minútach.

Čítanie výsledkov

Negatívny výsledok (Nemáte ovuláciu):

ovulácia zatiaľ neprebíha: Testovacia čiarka (T) je svetlejšia ako kontrolná čiarka (C), alebo sa neobjaví vôbec

Pozitívny výsledok (Máte ovuláciu):

Vaše ovulácie buď probíha alebo nastane v ďalších 24–48 hodinách: Testovacia čiarka (T) je rovnaká alebo tmavšia farby než kontrolná čiarka (C).

Neplatný výsledok:

Pokiaľ nebol test urobený správnym spôsobom, neobjavil sa žiadny farebný prúžok alebo sa objavil len prúžok v testovacej oblasti (T), nie však v kontrolnej oblasti (C). Zopakujte test znova. Pokiaľ je výsledok testu opakovane neplatný, kontaktujte, prosím, výrobcu alebo predajcu. Nazabudnite uviesť číslo šarže, ktoré nájdete na obale testu (LOT).

Poznámka: Pokiaľ je zafarbenie prúžku v testovacej oblasti slabé, odporúčame urobiť test po 24–48 hodinách znova. Testovací prúžok je jednorázový, nemôže byť použitý opakovane.

Upozornenie: Uchovávať v originálnom zatvorenom vrecku pri teplote 4–30 °C, najdlhšie do dátumu použiteľnosti.

Chráňte pred vlhkosťou, nevystavujte zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Nesmie zmraznúť!

Vrecko otvárajte až tesne pred použitím testu.

Uchovávať mimo dosah detí.

Obsah balenia: Testovacie strips (prúžky) v ochrannom obale + vysušiaci vankúšik. Vysušiaci vankúšik slúži len na účely skladovania, pre vlastné testovanie sa nepoužíva. Pribalový leták s návodom na použitie.

Diagnostický zdravotnícky prostriedok je určený na sebatestovanie in vitro v shode s nariadením č. 56/2015 Sb, o technických požiadavkách na diagnostické zdravotnícke prostriedky in vitro.

Výrobca: Nantong Egens Biotechnology Co., Ltd, Building 15, Building 12 (west), Xinghu Avenue, Nantong Economy & Technology Development Zone, 226010, Nantong, P. R. China

Distribúcia: ADIEL s.r.o. V Cibulkách 359/52, Praha 5 – 15000, Česká republika

Viac informácií na: www.adiel.sk

