

NÁVOD K POUŽITÍ

Babystart FertilSafe PLUS® lubrikační gel na podporu početí (Multipack)

Lubrikant, který je bezpečný pro spermie a vhodný pro všechny páry, které se snaží otěhotnět.

- KLINICKY TESTOVANÝ
- VYVÁŽENÉ pH
- BEZ PARABENŮ

FertilSafe PLUS byl vytvořen firmou Babystart Ltd, která je jedna z předních světových poskytovatelů diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a doplňků stravy pro podporu plodnosti. Naši odborníci vyvinuli lubrikační gel FertilSafe PLUS speciálně pro páry, které se snaží otěhotnět. FertilSafe PLUS byl vyvinutý tak, aby napodoboval přirozené prostředí, kterým sperma putuje při cestě k vajíčku. Zvyšuje komfort během pohlavního styku a pomáhá tak při oplodnění. FertilSafe PLUS byl klinicky testován, aby se prokázalo, že není závadný pro spermie a splňuje veškeré přísné testy pH a konzistence, která chrání přirozené prostředí pro bezpečí a životaschopnost spermií.

Prosíme, přečtěte si tyto instrukce před použitím.

Jak funguje FertilSafe PLUS?

FertilSafe PLUS funguje na bázi lubrikantu, který vytváří přirozené a přátelské prostředí pro spermie na cestě k oplodnění vajíčka. Některé standardní lubrikační gely negativně ovlivňují a poškozují spermie, případně brání pohybu spermií. Proto je potřeba se těmto gelům vyvarovat - zvláště během snahy o početí. Lubrikační gel FertilSafe PLUS zajistí vyvážené pH a ideální prostředí pro přirozené početí. Speciálně vytvořený gel na podporu početí chrání spermie, pozitivně ovlivňuje jejich pohyblivost a životaschopnost. Proto je vhodné a bezpečné ho používat v průběhu snahy o početí.

FertilSafe PLUS TIPY:

- Aplikujte FertilSafe přibližně 15 minut před pohlavním stykem, aby se gel dokonale rozpůlil.
- Doporučujeme dávkovat aplikátor dostatečným množstvím gelu (mezi cca polovinou a celým aplikátorem). V průběhu času si sami určitě, jaké množství je pro vás dostačující.
- Během aplikování zaujměte vhodnou pozici. Některé ženy stojí, leží nebo je pro ně nejlepší aplikace vsedě nad toaletou.

Jak používat FertilSafe PLUS?

Může být aplikován před nebo během pohlavního styku a je vhodný pro každodenní použití. Gel dávkujte pomocí aplikátorů, které jsou v balení dodávány nebo můžete aplikovat přímo z tuby.

Dávkování přímo z tuby:

Dostatečné množství lubrikantu vytlačte z tuby přímo na prsty a aplikujte na povrch pánských genitálií/dovnitř dámských genitálií.

Používání předvyplněných aplikátorů:

1. Přidržte úzký konec aplikátoru směrem nahoru, otočte uzávěrem, který poté vyhodte.
2. Pomalu vložte úzkou část aplikátoru dovnitř vagíny. To lze provést vleže, vsedě (např. nad toaletou) nebo vestoje.
3. Několikrát zmáčkněte aplikátor, ze kterého se vytlačí gel FertilSafe PLUS přímo do vagíny.
4. Pokračujte do úplného vyprázdnění aplikátoru a opatrně vyjměte z vagíny.
5. Aplikátor po vyjmutí vyhodte.

Používání opakovaně použitelných aplikátorů:

1. Vyjměte jeden z aplikátorů z hygienického obalu.
2. Odstraňte víčko z tuby FertilSafe PLUS 75 ml a nasadte aplikátor na konec tuby.
3. Táhnutím pístu naplňte aplikátor dostatečným množstvím gelu (půlku až celý).
4. Aplikátor od tuby oddělte a tubu s gelem FertilSafe PLUS 75 ml ihned pečlivě zavíckujte.
5. Opatrně vložte aplikátor do vagíny. Během aplikování gelu můžete ležet, sedět (např. nad toaletou) nebo stát – záleží na vás, jaká poloha je vám příjemná.
6. Doporučujeme vám vkládat aplikátor pouze do jeho poloviny. Díky tomu se gel rovnoměrně rozprostře kolem vaginální stěny.
7. Nyní pomalu a lehce zmáčkněte píst a aplikujte gel z aplikátoru.
8. Opatrně vyjměte aplikátor z vagíny.
9. Po použití aplikátor vždy důkladně opláchněte pod tekoucí teplou vodou.

Důležité:



Bezpečnostní pokyny pro opakovaně použitelné aplikátory:

- Nenechávejte gel připravený v aplikátoru po dobu delší než 30 minut před použitím. Nepoužitý gel z aplikátoru odstraňte a aplikátor vymyjte pro příští použití. Nikdy neschovávejte zbylý gel v aplikátoru pro příští použití!
- Vyčistěte aplikátor opláchnutím pod teplou vodou.



Bezpečnostní pokyny pro předvyplněné 5 ml aplikátory (vhodné jako cestovní balení):

- Nepoužívejte 5 ml aplikátor, pokud je zátka evidentně poškozená.
- Aplikátor je určený pouze pro jednorázové použití - neuchovávejte po otevření pro další používání.



Bezpečnostní pokyny pro 75 ml gel v tubě:

- Nenechávejte tubu otevřenou bez víčka.

Obecné bezpečnostní pokyny:

- Skladujte při pokojové teplotě (4-30 °C).
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti - viz obal aplikátoru/tuby.

Varování:

- FertilSafe PLUS není antikoncepce. Nepoškozuje spermie ani nezhoršuje funkci spermií.
- Pokud se u Vás vyskytne podráždění, okamžitě přestaňte gel užívat. Pokud stav přetrvává vyhledejte lékaře.
- Nepoužívejte jej v případě aktivní vaginální infekce.
- Pokud jste v minulosti prošla vaginální operací, poraďte se před použitím s lékařem.
- Používejte pouze podle uvedeného návodu.



Složení:

AQUA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, MARIS SAL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MAGNESIUM CHLORIDE

Balení obsahuje: FertilSafe PLUS 75 ml v tubě, opakovaně použitelné aplikátory, aplikátory FertilSafe PLUS 5 ml, kompletní návod k použití.

Výrobce: Research & Innovation Centre, Babystart Ltd. Finch Close, Nottingham UK NG7 2NN.

Dovoz a distribuce: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665

Více informací: www.otehotnet.cz

NÁVOD NA POUŽITIE

Babystart FertilSafe PLUS® lubrikačný gél na podporu počatia (Multipack)

Lubrikant, ktorý je bezpečný pre spermie a vhodný pre všetky páry ktoré sa snažia otehotnieť.

- KLINICKY TESTOVANÝ
- VYVÁŽENÉ pH
- BEZ PARABÉNOV

FertilSafe PLUS bol vytvorený firmou Babystart Ltd., ktorá je jednou z popredných svetových poskytovateľov diagnostických zdravotníckych prostriedkov in vitro a doplnkov stravy pre podporu plodnosti. Naši odborníci vyvinuli lubrikačný gél FertilSafe PLUS špeciálne pre páry, ktoré sa snažia otehotnieť. FertilSafe PLUS bol vyvinutý tak, aby napodobnil prirodzené prostredie, ktorým spermie putujú na ceste k vajíčku. Zvyšuje komfort pri pohlavnom styku a pomáha tak pri oplodnení. FertilSafe PLUS bol klinicky testovaný, aby sa preukázalo, že nie je závadný pre spermie a spĺňa prísne pH testy a konzistenciu, ktorá chráni prirodzené prostredie pre bezpečie a životaschopnosť spermií.

Prosíme, prečtete si tyto instrukce před použitím.

Ako funguje FertilSafe PLUS?

FertilSafe PLUS funguje na báze lubrikantu, ktorý vytvára prirodzené a priateľské prostredie pre spermie na ceste k oplodneniu vajíčka. Niektoré štandardné lubrikačné gély negatívne ovplyvňujú a poškodzujú spermie, prípadne bránia pohybu spermií. Preto je treba sa týmto gélom vyvarovať – zvlášť pri snahe o počatie. Lubrikačný gél FertilSafe PLUS zaisťuje vyvážené pH a ideálne prostredie pre prirodzené počatie. Špeciálne vytvorený gél na podporu počatia chráni spermie, pozitívne ovplyvňuje ich pohyblivosť a životaschopnosť, preto je vhodné a bezpečné ho používať v priebehu snahy o počatie.

FertilSafe PLUS TIPY:

- Aplikujte FertilSafe približne 15 minút pred pohlavným stykom, aby sa gél dokonale rozpíjal.
- Odporúčame aplikátorom dávkovať dostatočné množstvo gélu (medzi cca polovicou a celým aplikátorom). Postupom času si samy určíte, aké množstvo je pre vás dostačujúce.
- Počas aplikácie zaujmite vhodnú pozíciu. Niektoré ženy stoja, ležia alebo je pre ne najlepšia aplikácia v sede nad toaletou.

Ako používať FertilSafe PLUS?

Môže byť aplikovaný pred alebo v počas pohlavného styku a je vhodný na každodenné použitie. Gél dávkuje pomocou aplikátoru, ktoré sú v balení dodávané alebo môžete aplikovať priamo z tuby.

Dávkovanie priamo z tuby:

Dostatočné množstvo lubrikantu vytlačte z tuby priamo na prsty a aplikujte na povrch pánskych genitálií/dovnútra dámskych genitálií.


Používanie predvyplnených aplikátorov:

1. Pridržiť úzky koniec aplikátoru smerom nahor, otočte uzáverom, ktorý po otvorení tuby vyhodte.
2. Pomaly vložte úzku časť aplikátoru dovnútra vagíny. Toto možno vykonať poležiaci, v sede (napr. nad toaletou) alebo v postojke.
3. Niekoľkokrát po sebe stlačte aplikátor, z ktorého sa vytlačí gél FertilSafe PLUS priamo do vagíny.
4. Pokračujte kým sa aplikátor úplne nevyprázdni a opatrne ho vytiahnite z vagíny.
5. Aplikátor po vytiahnutí vyhodte.

Používanie aplikátorov na opakované použitie:

1. Vytiahnite jeden z aplikátorov z hygienického obalu.
2. Odstráňte viečko z tuby FertilSafe PLUS 75ml a nasadte aplikátor na koniec tuby.
3. Potiahnutím piestu naplníte aplikátor dostatočným množstvom gélu (pol aplikátora až celý).
4. Aplikátor od tuby oddelte a tubu s gélom FertilSafe PLUS 75ml ihneď starostlivo zaviečkujte.
5. Opatrne vložte aplikátor do vagíny. Počas aplikácie gélu môžete ležať, sedieť (napr. nad toaletou) alebo stáť – záleží na vás, aká poloha je pre vás príjemná.
6. Odporúčame vám vložiť aplikátor iba do jeho polovice. Vďaka tomu sa gél rovnomerne rozotrie po vaginálnych stenách.
7. Teraz pomaly a jemne stlačte piest a aplikujte gél z aplikátoru.
8. Opatrne vytiahnite aplikátor z vagíny.
9. Po použití aplikátor vždy dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

Dôležité:

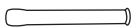

Bezpečnostné pokyny pre aplikátory na opakované použitie:

- Nenechávajte gél pripravený v aplikátore po dobu dlhšiu než 30 minút pred použitím. Nepoužitý gél z aplikátoru odstráňte a aplikátor umyte pre ďalšie použitie. Nikdy neschovávajte gél čo ostane v aplikátore na ďalšie použitie.
- Vyčistite aplikátor opláchnutím pod teplou vodou.



Bezpečnostné pokyny pre predvyplnené 5ml aplikátory (vhodné ako cestovné balenie):

- Nepoužívajte 5ml aplikátor pokiaľ je zátka evidentne poškodená.
- Aplikátor je určený iba na jednorázové použitie – neuchovávajte po otvorení na ďalšie použitie.



Bezpečnostné pokyny pre 75ml gél v tube:

- Nenechávajte tubu otvorenú bez viečka.

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

- Skladujte pri izbovej teplote (4-30 °C).
- Uchovávajte mimo dosah detí.
- Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti – viď obal aplikátoru/tuby.

Varovanie:

- FertilSafe PLUS nie je antikoncepcia. Nepoškodzuje spermie ani nezhoršuje funkciu spermií.
- Pokiaľ sa u Vás vyskytne podráždenie, okamžite prestaňte gél užívať. Pokiaľ stav pretrváva vyhľadajte lekára.
- Nepoužívajte v prípade aktívnej vaginálnej infekcie.
- Pokiaľ ste v minulosti absolvovala vaginálnu operáciu, poraďte sa so svojím lekárom.
- Používajte iba podľa uvedeného návodu.



Zloženie:

AQUA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PHENOXYETHANOL, MARIS SAL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, MAGNESIUM CHLORIDE

Balenie obsahuje: FertilSafe PLUS 75 ml v tube, aplikátory na opakované použitie, aplikátory FertilSafe PLUS 5 ml, kompletný návod na použitie
Výrobca: Research & Innovation centre, Babystart Ltd. Finch Close, Nottingham UK NG7 2NN.

Dovoz a distribúcia: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665

Viac informácií: www.otehotnet.cz