

Popis a návod k použití

FertilCheck® test ženské plodnosti

Test ženské plodnosti vám umožňuje určit přítomnost FSH pohlavního hormonu z moči. Je určen pro domácí použití. Díky FertilCheck testu ženské plodnosti ověříte svoji plodnost v soukromí svého domova. Test je jednoduchý a rychlý, s vysokou spolehlivostí až 99 %.

Výrobek pochází od špičkové anglické společnosti Babystart®, která se naplno věnuje ženské a mužské plodnosti.

Test je vhodný pro ženy:

- s nepravidelnou menstruací,
- které delší dobu nemohou otěhotnět,
- s věkem vyšším než 35 let.

Návod k použití:

1. Vyndejte tester z fólie.
2. Sejměte z testu fialový kryt a nasadte ho na opačný konec pro snadnější použití.
3. Uchopte test za přemístěný fialový kryt a nastavte obnaženou absorpční část tak, aby směřovala směrem dolů a především do proudu moči. Takto ponechejte max. 10 sekund.
4. Snažte se zamezit styku kontrolního a testovacího okénka s močí. Dalším možným způsobem je připravit si moč do suché a čisté nádoby. Poté položte kolmo proužek testu do moči na max. 10 sekund, ne výše než je značka maximum.
5. Ihned po absorpci uzavřete absorpční část opět fialovým krytem a položte test na vodorovnou podložku. Nyní začněte počítat čas - ideálně 5 minut.

• *Jakmile test začíná fungovat, uvidíte, jak střední část proužku začne světle červenat od značky T (test) až po značku C (control).*

6. Po 5 minutách čtete výsledek testu, nečtete výsledek déle než po 10 minutách.

Čtení výsledků:

Pozitivní výsledek: Vyznačuje se 2 tmavými červenými čárkami uprostřed testu, čárka T (test) a čárka C (control). Čárka T musí mít stejnou barvu nebo tmavší než čárka C.

Negativní výsledek: Jsou vidět 2 čárky, T (test) a C (control), přičemž čárka C je tmavší než čárka T, nebo je vidět pouze čárku C.

Neplatný výsledek: Nejsou vidět žádné čárky C a T, test opakujte znovu.

Výsledky:

Negativní test znamená, že nemáte vysoký FSH hormon, je to dobré znamení pro těhotenství. Pokud ale máte nepravidelnou menstruaci nebo příznaky menopauzy, doporučujeme navštívit lékaře.

Pozitivní test - pro ověření opakujte další test znovu za 5-7 dní.

- *Pokud jsou oba dva testy pozitivní: znamená to, že máte vysokou hladinu FSH hormonu. V případě, že plánujete otěhotnět, doporučujeme navštívit lékaře. Vysoká hladina FSH se rovněž objevuje před menopauzou. Pokud máte příznaky nepravidelné menstruace apod., navštivte svého lékaře.*
- *Pokud je druhý test negativní: hladina FSH není vysoká, je to dobrá indikace k těhotenství.*

Upozornění:

Čtete pozorně příbalový leták před použitím testu. Nepoužívejte test po době expirace, uvedené na obalu. Skladujte při teplotě 2-30 °C. Nenechávejte test v chladné místnosti (mrazu). Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte mimo dosah dětí. Test je určen pouze pro vnější použití, nepoužívejte vnitřně. Neotvírejte test dříve, nežli si přečtete veškeré instrukce k použití.

Balení: 2 bílé umělohmotné testy s fialovou špičkou, každý balený zvlášť v ochranné fólii.

Diagnostický zdravotnický prostředek je určen pro sebetestování in vitro ve shodě s nařízením č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Výrobce: Research & Innovation centre, Babystart Ltd. Finch Close, Nottingham UK NG7 2NN.

Distributor: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665

Více informací: www.otehotnet.cz

Poslední revize návodu: 15. 8. 2019

Popis a návod na použitie

FertilCheck® test ženskej plodnosti

Test ženskej plodnosti vám umožňuje určiť prítomnosť FSH pohlavného hormónu z moču. Je určený na domáce použitie. Vďaka FertilCheck testu ženskej plodnosti overíte svoju plodnosť v súkromí svojho domova. Test je jednoduchý a rýchly, s vysokou spoľahlivosťou až 99%.

Výrobok pochádza od špičkovej anglickej spoločnosti Babystart®, ktorá sa naplno venuje ženskej a mužskej plodnosti.

Test je vhodný pre ženy:

- s nepravidelnou menštruáciou,
- ktoré dlhšiu dobu nemôžu otehotnieť,
- s vekom vyšším ako 35 rokov.

Návod na použitie:

1. Vyberte tester z fólie.
2. Odstráňte z testu fialový kryt a nasadte ho na opačný koniec pre jednoduchšie použitie.
3. Uchopte test za premiestnený fialový kryt a nastavte obnaženú absorpčnú časť tak, aby smerovala smerom dole a predovšetkým do prúdu moču. Takto ponechajte max. 10 sekúnd.
4. Snažte sa zamedziť styku kontrolného a testovacieho okienka s močom. Ďalším možným spôsobom je pripraviť si moč do suchej a čistej nádoby. Potom položte kolmo prúžok testu do moču na max. 10 sekúnd, nie vyššie ako je značka maximum.
5. Ihneď po absorpcii uzavrite absorpčnú časť opäť fialovým krytom a položte test na vodorovnú podložku. Teraz začnite počítat čas - ideálne 5 minút.

• *Akonáhle test začína fungovať, uvidíte, ako stredná časť prúžku začne svetle červenať od značky T (test) až po značku C (control).*

6. Po 5 minútach čítajte výsledok testu, nečítajte výsledok po viac ako 10 minútach.

Čítanie výsledkov:

Positívny výsledok: Vyznačuje sa 2 tmavými červenými čiarkami uprostred testu, čiarka T (test) a čiarka C (control). Čiarka T musí mať rovnakú farbu alebo tmavšiu ako čiarka C.

Negatívny výsledok: Sú vidieť 2 čiarky, T (test) a C (control), pričom čiarka C je tmavšia ako čiarka T, alebo je vidieť len čiarku C.

Neplatný výsledok: Nie sú vidieť žiadne čiarky C a T, test opakujte znova.

Výsledky:

Negatívny test znamená, že nemáte vysoký FSH hormón, je to dobré znamenie pre tehotenstvo. Pokiaľ ale máte nepravidelnú menštruáciu alebo príznaky menopauzy, odporúčame navštíviť lekára.

Positívny test - pre overenie opakujte ďalší test znova za 5-7 dní.

• *Ak sú obidva testy pozitívne: znamená to, že máte vysokú hladinu FSH hormónu. V prípade, že plánujete otehotnieť, odporúčame navštíviť lekára. Vysoká hladina FSH sa tiež objavuje pred menopauzou. Ak máte príznaky nepravidelnej menštruácie a pod., Navštívte svojho lekára.*

• *Ak je druhý test negatívny: hladina FSH nie je vysoká, je to dobrá indikácia k tehotenstvu.*

Upozornění:

Čítajte pozorne príbalový leták pred použitím testu. Nepoužívajte test po dobe expirácie, uvedenej na obale. Skladujte pri teplote 2-30 ° C. Nenechávajte test v chladnej miestnosti (mraze). Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Uchovávajte mimo dosahu detí. Test je určený iba na vonkajšie použitie, nepoužívajte vnútorne. Neotvárajte test skôr, než si prečítate všetky inštrukcie na použitie.

Balenie: 2 biele umelohmotné testy s fialovou špičkou, každý balený zvlášť v ochrannéj fólii. Diagnostický zdravotnícky prostriedok je určený na samovyšetrenie in vitro v zhode s nariadením č. 56/2015 Zb. o technických požiadavkách na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro.

Výrobca: Research & Innovation centre, Babystart Ltd. Finch Close, Nottingham UK NG7 2NN.

Distribútor: ADIEL, s.r.o., V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČ: 01388665

Viac informácií: www.adiel.sk

Posledná revízia návodu: 15. 8. 2019