

## Ovulační test FertilControl Light DONNA

### Popis produktu:

Ovulační tester FertilControl Light (DONNA) je malý ruční mikroskop, podobný rtěnce. Tester je vhodný pro každodenní, opakované používání, na zjištění ovulace ze slin. Ovulace u ženy trvá asi 3 dny, 6 dní je považováno za plodné období. Tester tedy můžete využívat při snaze otěhotnět nebo jako antikoncepční pomocník pro ženy, které nechtějí užívat hormonální antikoncepci. Přesnost ovulačního testeru až 98%, mikroskopickou čočku lze zvětšit až 70krát.

### Návod k použití:



1. Sejměte z mikroskopu ochranné bílé víčko



2. Vytáhněte (nešroubujte) černou mikroskopickou čočku z bílého ochranného obalu.




3. Odstraňte ochrannou fólii ze spodní strany čočky.




4. Po odstranění ochranné fólie, vyčistěte sklíčko pomocí vlhkého tamponku nebo hadříku.



5. Před nanesením slin není vhodné konzumovat žádné potraviny, z důvodu nečistot v ústech, které mohou zkreslovat výsledek. Nasliňte prst (přiměřené množství slin), bez bublin, vložte na černé mikroskopické sklíčko přesně tam, kde byla ochranná fólie. Sklíčko postavte tak, aby sliny nestekly a nechte sliny zaschnout. Přesný čas usušení slin závisí na vlhkosti.

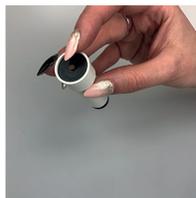

6. Po zaschnutí slin vraťte černý mikroskop zpět do bílého obalu.

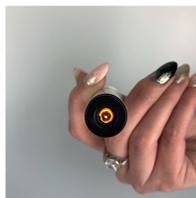

7. Na spodní straně testeru držte světlýk a nahlédněte do mikroskopické čočky pro zjištění výsledku. Výsledek si můžete otočením černé čočky přiblížit či oddálit

8. Po použití vyčistěte sklíčko pomocí vlhkého tamponku nebo hadříku.

### Čtení výsledků:

Obrázek č. 1: Neplodné období, vidíte nespojené tečky (Infertile period).

Obrázek č. 2: Asi 3 dny před začátkem ovulačního období, v tzv. mezidobí, můžete pozorovat krátké linky o síle vlasů. Je vidět několik krystalických struktur. Možnost početí před ovulačním obdobím (Transition fertile period) se pohybuje mezi 20-30 %.

Obrázek č. 3: Vidíte strukturu jako oční řasy, vzájemně se překrývají. Ovulace je v začátku, nebo probíhá. Je to vaše plodné období – jsou vidět krystaly estrogenu, tzv. kapradinová struktura (Fertile period).



č. 1



č. 2



č. 3

**Balení:** Bílá mikroskopická tyčinka. Diagnostický zdravotní prostředek je určený pro sebetestování in vitro ve shodě s nařízením č. 56/2015 Sb. O technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.  
**Doba použití:** 2 roky od prvního použití, datu prvního použití vyplňte prosím níže do rámečku. Před a po použití dbejte na pokyny v příbalovém letáku.  
**Upozornění:** Uchovávejte mimo dosah dětí. Tester skladujte v suchu, nevystavujte mrazu. **Výrobce:** AEI 24 Ltda, Avenida de Cal 125, 4750-778, Barcelos Portugal. **Distributor:** ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika. Více informací na: [www.otehotnet.cz](http://www.otehotnet.cz)  
 LOT number FCL12